

Vibračný strojček s lopatkami je obľúbenou terapeutickou pomôckou, ktorú používajú logopédi. Motor vibračného strojčka generuje vibrácie prenášané na vymeniteľné lopatky slúžiace na priamu masáž mäkkých tkanív ústnej dutiny, čím pomáhajú iniciovať a udržať správnu artikuláciu zvuku „r.“ Vibračný strojček sa odporúča hlavne pre terapiu rotacizmu a pre konzervatívnu liečbu skrátenej uzdičky jazyka.

Upozornenie

Vibračný strojček s lopatkami je určený pre terapeutov a učiteľov materských škôl, ako aj rodičov. Strojček by sa mal používať iba so špeciálnymi masážnymi lopatkami, ktoré sú vhodné na intraorálnu masáž. Ak sa prístroj namočí, odskrutkujte masážnu lopatku, rozložte strojček na dve časti, vyberte batériu a nechajte uschnúť.

Čistenie

Vymeniteľné lopatky a samotný strojček pred prvým použitím a pred každým ďalším použitím umyte v mydlovom roztoku alebo v dezinfekčných prostriedkoch s nízkym obsahom alkoholu. Masážne lopatky spolu s dielom vibrátora, ktorý slúži na ich montáž, je možné po odpojení od dielu s motorom ponoriť do vriacej vody a vydezinfikovať.

V prípade dezinfekcie chemickými prípravkami je potrebné všetky prvky pred použitím dôkladne opláchnuť pod tečúcou vodou.

Výmena batérie

Zariadenie používa na napájanie 1,5V AA batériu. Na inštaláciu batérie je potrebné rozložiť strojček na dve časti, čím sa otvorí priehradka na batérie. Vložte batériu podľa značiek na strojčeku: plus do plus, mínus do mínus. Telo vibrátora má tradičný závit, tzv pravý závit.